

Feline Blood Typing Kit

(Kedi Kan Grubu Testi)

Lütfen kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyunuz.

ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI


Bu kite; A, B veya AB kan grubunun belirlenmesi için, kurutulmuş Anti-A antikor veya lektin emdirilmiştir.

KİT İÇERİĞİ


Her kutu içeriği:

İÇERİK	5 TEST/KUTU	10 TEST/KUTU
Her birinde; kan grubu testi, çubuklar ve nem giderici bulunan plastik ambalaj	5	10
Tek kullanımlık damlalık	5	10
Buffer solüsyonu (3 mL)	1	2
Kan grubu kartı	5	10
Kullanım kılavuzu	1	1


TEST PROSEDÜRÜ

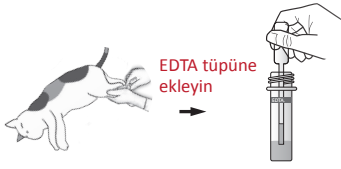


1 0.5 mL kan alın. (EDTA veya anti-koagülan içeren tüp kullanın)

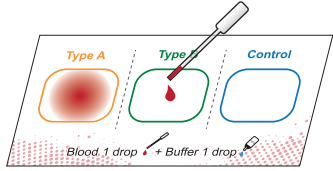


2 Kan kartının her bölümüne bir damla (20-30 µL) kan damlatın.

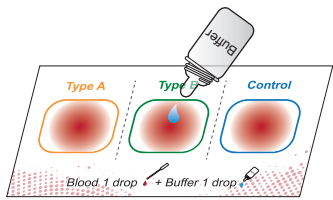

3 Her bölmeye bir damla buffer solüsyonu (20-30 µl) damlatın.

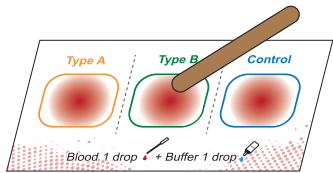

4 15 saniye boyunca çubukla karıştırın (Her bölmede farklı çubuk kullanın).

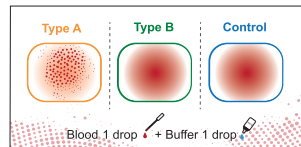


5 2 dakika içerisinde aglütinasyonu inceleyin.

SONUÇ

A Grubu			B Grubu		
Type A	Type B	Control	Type A	Type B	Control
A bölümünde aglütinasyon			B bölümünde aglütinasyon		
AB Grubu			Yanlış (+)		
Type A	Type B	Control	Type A	Type B	Control
A ve B bölümünde aglütinasyon			Kontrol bölümünde aglütinasyon		

Yanlış (+) : Uygun koşullarda olmayan kan veya otoimmün-aracılı hemolitik hastalık.

GERÇEKLEŞEBİLECEK TRANSFÜZYONLAR

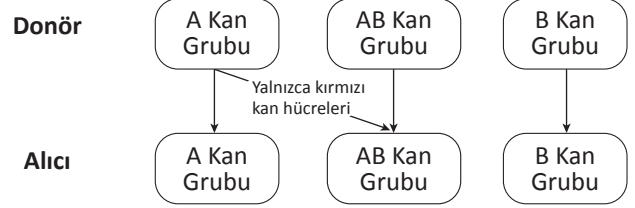

※ Kan transfüzyonundan önce; doğal yolla oluşan bilinmeyen alloantikor kontrolü için, majör çapraz-karşılaştırma testinin de yapılması gerekmektedir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

	SAKLAMA KOŞULLARI	ÜRETİM TARİHİNDEN İTİBAREN RAF ÖMRÜ
Açılmamış	Oda Sıcaklığı (2-30°C)/ Nem (% 20-80)	12 ay
Açılmış	Oda Sıcaklığı (16-26°C)/ Nem (% 20-80)	Hemen

UYARILAR

- Numune olarak alınan kanı 5. günden itibaren kullanmayın.
- Veteriner hekimler tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü oda sıcaklığında muhafaza edin.
- Hastanın otoimmün-aracılı hastalığı varsa, yanlış pozitif veya negatif sonuçlara neden olabileceğine dikkat edilmelidir.
- Kedi kan grubu aglütinasyonu için, numunenin hematokrit seviyesi %20-%35 olmalıdır.
- Son kullanma tarihi geçmiş ve hasar görmüş ürünleri kullanmayın.
- Yanlış kullanım ve kalite bozulmasını önlemek için, bu kitede sunulandan başka bir buffer solüsyon kullanmayın.
- Teşhis kitlerini, kullanılan tüm pleytlerini, numunelerini, işlem görmüş tüm materyallerini, ekipman ve sarf malzemelerini dekontaminasyon yöntemleri ile dekontamine edildikten sonra tıbbi ürünlerde olduğu gibi "Tıbbi Atık" olarak değerlendirilmesi ve tıbbi atıklar için oluşturulmuş mevzuatlara göre imha edilmesi sağlanmalıdır.

Seri numarası ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiştir.

ÜRETİCİ FIRMA ADI VE ADRESİ
BIOGUARD Corporation

6F. No.20-1. Wugong 5th Road,Wugu District,
New Taipei City 248020,Taiwan

TEL : +886-2-5591-6688 | FAX : +886-2-6625-8182
https://www.bioguardlabs.com

İTHALATÇI FIRMA ADI VE ADRESİ

ORUÇ Özel Veteriner Hizmetleri Hayvancılık Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mansuroğlu Mah. 263/5 Sk. No:3 Bayraklı-Izmir TÜRKİYE