


CPV Ag / CCV Ag Combo Test


- Canine Parvovirus Antigen
- Canine Coronavirus Antigen

Combo Test

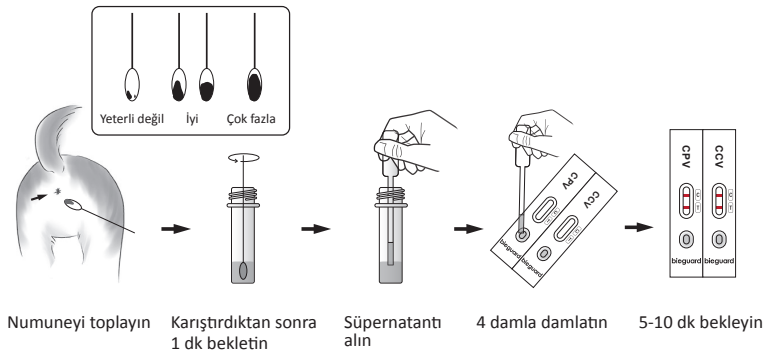

SONUÇLARIN YORUMLANMASI

- 1) Pozitif:** T bandının belirgin veya belli belirsiz olmasına bakılmaksızın, hem C hem de T bandının varlığı.
- 2) Negatif:** Sadece belirgin C bandının görünmesi.
- 3) Geçersiz:** T bandının görünüp görünmemesine bakılmaksızın, C bölgesinde renkli bandın görünmemesi.

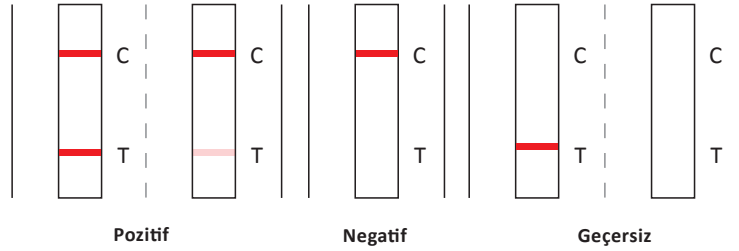

DEPOLAMA

- Test kitleri doğrudan güneş ışığından uzakta, 2-30°C arasında saklanmalıdır. DONDURMAYIN. Soğuk koşullarda saklanması durumunda, kullanmadan önce 15~30 dakika oda sıcaklığında tutun.
- Test kitleri, folyo ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihine kadar (24 ay) stabildir.
- Seri numarası ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiştir.

UYARILAR

- En iyi sonucu elde etmek için, lütfen bu talimatlara kesin olarak uyun.
- Lütfen kullanmadan önce folyo ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihine dikkat edin. Kullanım süresi dolmuş kitleri kullanmayın.
- Kitin havaya uzun süre maruz kalmasını ve nemden etkilenmesini önlemek için test yapılmaya hazır olana kadar kiti folyo ambalajından çıkarmayın. **Folyo ambalaj açıldıktan sonra tüm kullanım işlemi 10 dakika içinde tamamlanmalıdır.**
- Test kiti, damlalık, test buffer solüsyonu ve swab dahil olmak üzere kutudaki tüm test malzemeleri tek kullanımlıktır. Yeniden kullanmayın.
- **Teşhis kitlerini, kullanılan tüm pleytlerini, numunelerini, işlem görmüş tüm materyallerini, ekipman ve sarf malzemelerini dekontaminasyon yöntemleri ile dekontamine edildikten sonra tıbbi ürünlerde olduğu gibi "Tıbbi Atık" olarak değerlendirilmesi ve tıbbi atıklar için oluşturulmuş mevzuatlara göre imha edilmesi sağlanmalıdır.**
- Test şeritlerinde anormal oluşumların meydana gelmesini engellemek için, numune bölmelerine numuneyi uygulandıktan sonra test cihazını hareket ettirmeyin.
- Bu kitteki malzemeler standart bir seri birimi olarak kalite kontrole tabi tutulmuştur. Farklı seri numaralı birimlerden malzemeleri karıştırmayın.

SINIRLAMA

Bu test sadece hayvan sağlığında kullanım ve in vitro tanı içindir, çeşitli faktörlerin neden olduğu yanlış negatif ve yanlış pozitif sonuç alma olasılığını tamamen ortadan kaldırmaz. Bu nedenle, test kitlerinden elde edilen sonuçların yanı sıra, veteriner hekimler pratikte kesin tanı koymak için diğer klinik bilgileri ve laboratuvar tanı yöntemlerini de dikkate almalıdır.

KULLANIM AMACI

Bioguard Canine Parvovirus (CPV) Ag/Canine Coronavirus (CCV) Ag Combo Testi, köpek dışkısında Köpek Parvovirüs ve Köpek Koronavirüsün hızlı ve nitel tespiti için Bioguard Corporation tarafından geliştirilmiş ve üretilmiş bir sandviç yanak akış immüno-kromatografik testtir. Test cihazı, görünmez bir T (test) bölgesi ve C (kontrol) bölgesi ile kaplı olan bir test penceresine sahiptir. Numune, cihazdaki numune bölmesine uygulandığında; reaktif, test şeridinin yüzeyinde yanak olarak akacaktır. Numunede yeterli CPV antijeni/CCV antijeni varsa, görülebilir bir T bandı belirecektir. Geçerli bir sonuç elde edilebilmesi için, bir numune uygulandıktan sonra C bandı her zaman görünmelidir. Bu sayede cihaz, numunede CPV Ag/CCV Ag varlığını doğru bir şekilde gösterebilir.

KİT İÇERİĞİ

İÇERİK	5 TEST/KUTU	10 TEST/KUTU
CPV Ag/CCV Ag test cihazı	5	10
Tek kullanımlık damlalık	5	10
Test buffer tüpü	5	10
Steril swab	5	10
Kullanım kılavuzu	1	1

NUMUNE

Köpek dışkısı.

TEST PROSEDÜRÜ

- Kapalı ambalajı, test buffer tüpünü ve steril swabı kutudan çıkarın.
- Kaseti folyo ambalajından çıkarın ve yatay olarak temiz bir yüzeye yerleştirin.
- Köpeğin dışkısını swabla toplayın ve dışkının swaba iyice emilmesini sağlayın.
- **Dışkı miktarını, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi takip etmek gerekmektedir. Aşırı miktarda dışkı yanlış pozitif bir sonuca ve yavaş aktarıma neden olabilir.**
- Sunulan test buffer tüpünün kapağını açın. Numune swabını tüpe yerleştirin ve karıştırın. Numunenin buffer solüsyon içinde iyi çözündüğünden emin olmak için çalkalayın.
- Tek kullanımlık damlalık uygulamasıyla her bir numune bölmesine kademeli olarak 4 damla (100µL) numune özütü damlatın (tıkanıklık durumunda tortuyu uzaklaştırın).
- Sonucu 5-10 dakika içinde yorumlayın. **10 dakikadan sonra sonuç geçersizdir.**

ÜRETİCİ FIRMA ADI VE ADRESİ
BIOGUARD Corporation

6F. No.20-1. Wugong 5th Road,Wugu District,
New Taipei City 248020,Taiwan
TEL : +886-2-5591-6688 | FAX : +886-2-6625-8182
https://www.bioguardlabs.com


science for animal care

İTHALATÇI FIRMA ADI VE ADRESİ

ORUÇ Özel Veteriner Hizmetleri Hayvancılık Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mansuroğlu Mah. 263/5 Sk. No:3 Bayraklı-İzmir TÜRKİYE