

FCoV Ab Test

Feline Coronavirus Antibody Test

Το γρήγορο τεστ **Bioguard V Labs Feline Corona Virus Ab** είναι σύνθετη, ανοσοχρωματογραφική δοκιμή πλευρικής ροής (sandwich lateral flow immunochromatographic assay) για την ταχεία, ποιοτική ανίχνευση αντιγόνων του κορωνοϊού της των αιλουροειδών, σε δείγμα ορού, πλάσματος, ασκτικού υγρού ή υπεζωκοτικής συλλογής από γάτα. Η συσκευή πραγματοποίησης του τεστ έχει ένα παράθυρο ανάγνωσης του αποτελέσματος, επικαλυμμένο με μία μη ορατή ζώνη T (test) και άλλη μία, επίσης μη ορατή ζώνη ελέγχου C (control). Τοποθετώντας το σύζευγμα δείγματος / ρυθμιστικού διαλύματος στο φρεάτιο στο άκρο της συσκευής αυτό αρχίζει να ρέει κατά μήκος της μεμβράνης, προς την περιοχή ανάγνωσης των αποτελεσμάτων. Όταν στο δείγμα υπάρχουν αντιγόνα του κορωνοϊού των αιλουροειδών, μία γραμμή θα χρωματιστεί στην αντίστοιχη ζώνη (T). Μία γραμμή θα πρέπει να σχηματίζεται πάντοτε στην αντίστοιχη ζώνη ελέγχου (C) η οποία υποδηλώνει την εγκυρότητα του αποτελέσματος (ότι η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σωστά).

Περιεχόμενα της συσκευασίας


Περιεχόμενο	συσκευασία 5 τεμαχίων	συσκευασία 10 τεμαχίων
Συσκευή τεστ FCoV Ab	5	10
Πιπέτα μιας χρήσης	5	10
Φιαλίδιο συλλογής EDTA	5	10
Ρυθμιστικό διάλυμα σύζευξης	5	10
Οδηγίες χρήσης	1	1

Δείγμα

Ορός, πλάσμα, ασκτικό υγρό ή υπεζωκοτική συλλογή από γάτα.

Διαδικασία πραγματοποίησης του τεστ


- Ανοίξτε το κουτί και πάρτε από μέσα ένα σφραγισμένο τεστ, το ρυθμιστικό διάλυμα και ένα φιαλίδιο συλλογής EDTA.
- Ανοίξτε τη σφραγισμένη συσκευασία, βγάλτε μία συσκευή (κασέτα) τεστ και τοποθετήστε τη σε μία καθαρή, οριζόντια επιφάνεια.
- Πάρτε το προς εξέταση δείγμα [ορός, πλάσμα (φυγοκεντρώ-ντας το περιεχόμενο του φιαλιδίου EDTA), ασκτικό υγρό ή υπεζωκοτική συλλογή] και με την πιπέτα μιας χρήσης βάλτε μία σταγόνα (20μl) στο φιαλίδιο με το ρυθμιστικό υγρό και αναμείξτε το καλά. Στη συνέχεια ενοσταλάξτε 3-4 σταγόνες από το διάλυμα στο φρεάτιο συλλογής του δείγματος, στο άκρο της συσκευής (κασέτας).
- Διαβάστε το αποτέλεσμα της δοκιμής μετά από 5-10 λεπτά. Μετά την παρέλευση 10 λεπτών, αγνοήστε το αποτέλεσμα.

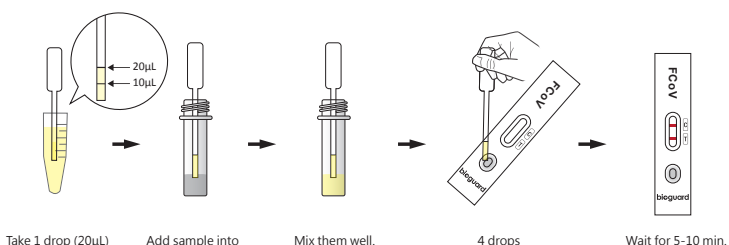

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Διαβάστε το αποτέλεσμα στην περιοχή ανάγνωσής του, στο κέντρο της συσκευής (κασέτας)

- Θετικό αποτέλεσμα:** εμφανίζεται χρώμα και στις δύο ζώνες (C)-Control και (T)-Test. Το αποτέλεσμα θεωρείται «θετικό» ανεξάρτητα από το πόσο έντονη ή αχνή εμφανίζεται η γραμμή στην περιοχή (T).
- Αρνητικό αποτέλεσμα:** εμφανίζεται χρώμα μόνο στη ζώνη ελέγχου (C)-Control.
- Μη έγκυρο αποτέλεσμα:** δεν εμφανίζεται χρώμα στη ζώνη (C)-Control. Είναι αδιάφορο αν εμφανίζεται χρώμα στη ζώνη (T)-Test. Αυτό οφείλεται συνήθως σε κάποιο λάθος που έγινε κατά τη διαδικασία πραγματοποίησης του τεστ. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επαναλάβουμε το τεστ με μεγαλύτερη προσοχή.

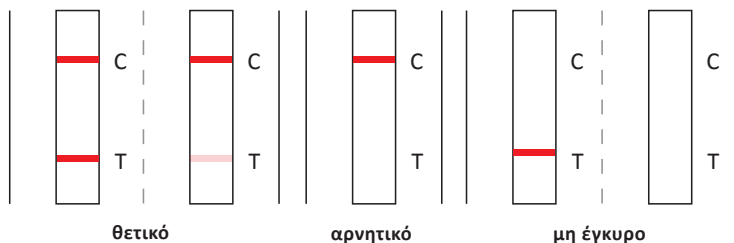

Αποθήκευση

- Τα τεστ διατηρούνται σε θερμοκρασία από 2°C ως 30°C.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην τα βάλετε στην κατάψυξη. Αν τα έχετε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως. Αν τα έχετε στο ψυγείο, αφήστε τα εκτός για 15 ως 30 λεπτά, ώστε να έρθουν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μην αφήσετε τα τεστ να εκτεθούν απευθείας σε ηλιακό φως.
- Τα τεστ παράγονται με χρόνο ζωής 24 μήνες. Η λήξη τους αναγράφεται στη συσκευασία.

Προφυλάξεις για να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα

Ακολουθήστε αυστηρά τις παρακάτω οδηγίες:

- Μην χρησιμοποιείτε τα τεστ μετά την ημερομηνία λήξης τους
- Μην βγάζετε το τεστ από την εσωτερική συσκευασία του (σε φύλο αλουμινίου) πριν από τη στιγμή που θα χρησιμοποιηθεί καθώς η έκθεσή του στον αέρα και στην υγρασία ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητά του. Ανοίγοντας το φύλο αλουμινίου στο οποίο είναι αποθηκευμένο, συστήνεται να χρησιμοποιηθεί εντός 10 λεπτών.
- Ολόκληρο το περιεχόμενο της συσκευασίας (τεστ, φιαλίδια, σταγονόμετρο και ρυθμιστικό διάλυμα) είναι μιας χρήσης.
- Μετά το τέλος της δοκιμής, απορρίψτε τα υλικά με τον προβλεπόμενο τρόπο (GLP-Good Laboratory Practice).
- Μην μετακινείτε την ταινία πάνω στην οποία ρέει το σύζευγμα (στην οποία πραγματοποιείται η δοκιμή) ακόμα κι αν φαίνεται ότι η διαδικασία δεν εξελίσσεται φυσιολογικά.
- Ποιοτικός έλεγχος διενεργείται στο περιεχόμενο κάθε παραγόμενης παρτίδας. Μην αναμειγνύετε υλικά προερχόμενα από διαφορετικές παρτίδες.

Περιορισμοί

Η δοκιμή προορίζεται μόνο για κτηνιατρική χρήση και in vitro διάγνωση. Δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ψευδώς αρνητικού και ψευδώς θετικού αποτελέσματος, που μπορούν να προκληθούν από διάφορους παράγοντες. Ως εκ τούτου, εκτός από το αποτέλεσμα της δοκιμής, συστήνεται όπως ο Κτηνίατρος λαμβάνει υπ' όψιν τη συνολική κλινική εικόνα του ασθενούς, το ιστορικό του και εργαστηριακές, διαγνωστικές εξετάσεις που επιβεβαιώνουν τη διάγνωση στην πράξη.