

FeLV Ag / FIV Ab Combo Test

- Feline Leukemia Virus Antigen
- Feline Immunodeficiency Virus Antibody

Combo Test

KULLANIM AMACI

Bioguard Feline Leukemia Virus (FeLV) Ag/Feline Immunodeficiency Virus (FIV) Ab Combo Testi, kedi kanında Kedi Leukemia Virüs (FeLV) antijeninin/Kedi Immunodeficiency Virüs (FIV) antikorunun hızlı ve nitel tespiti için Bioguard Corporation tarafından geliştirilmiş ve üretilmiş bir sandviç yanıl akış immünokromatografik testtir. Test cihazı, görünmez bir T (test) bölgesi ve C (kontrol) bölgesi ile kaplı olan bir test penceresine sahiptir. Numune, cihazdaki numune bölmesine uygulandığında; reaktif, test şeridinin yüzeyinde yanıl olarak akacaktır. Numunede yeterli FeLV antijeni/FIV antikoruna varsa, görülebilir bir T bandı belirecektir. Geçerli bir sonuç elde edilebilmesi için, bir numune uygulandıktan sonra C bandı her zaman görünmelidir. Bu sayede cihaz, numunede FeLV Ag/FIV Ab varlığını doğru bir şekilde gösterebilir.

KİT İÇERİĞİ

İÇERİK	5 TEST/KUTU	10 TEST/KUTU
FeLV Ag/FIV Ab test cihazı	5	10
Tek kullanımlık damlalık	5	10
EDTA kan alma tüpü	5	10
FeLV test buffer şişesi	1	1
FIV test buffer şişesi	1	1
Kullanım kılavuzu	1	1


NUMUNE

Kedi tam kan, serum veya plazması.


TEST PROSEDÜRÜ

- Kapalı ambalajı, test buffer şişelerini ve EDTA kan alma tüpünü kutudan çıkarın.
- Kaseti folyo ambalajından çıkarın ve yatay olarak temiz bir yüzeye yerleştirin.
- Numune olarak kedinin tam kan, serum veya plazmasını (EDTA tüpünden santrifüjleme) alın.
- Tek kullanımlık damlalık ile numuneyi alın, numune bölmelerine 1 damla (20µL) numune damlatın ve hemen karşılık gelen numune bölmelerine 4 damla (100µL) FeLV ve FIV test buffer solüsyonundan damlatın.
- Sonucu 5-10 dakika içinde yorumlayın. **10 dakikadan sonra sonuç geçersizdir.**

1) Serum numunesi

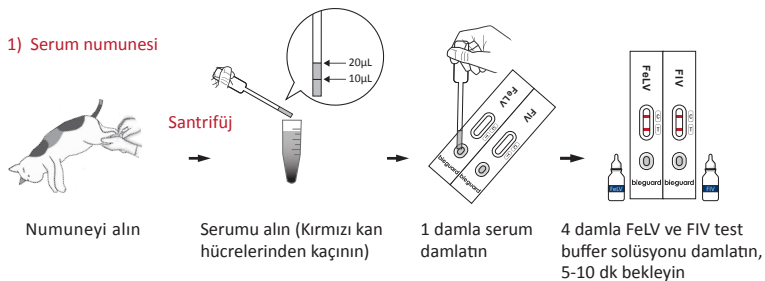


2) Tam kan veya plazma numunesi

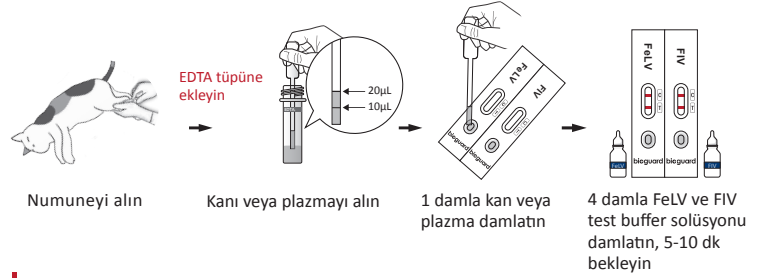

SONUÇLARIN YORUMLANMASI

- 1) Pozitif:** T bandının belirgin veya belli belirsiz olmasına bakılmaksızın, hem C hem de T bandının varlığı.
- 2) Negatif:** Sadece belirgin C bandının görünmesi.
- 3) Geçersiz:** T bandının görünüp görünmemesine bakılmaksızın, C bölgesinde renkli bandın görünmemesi.

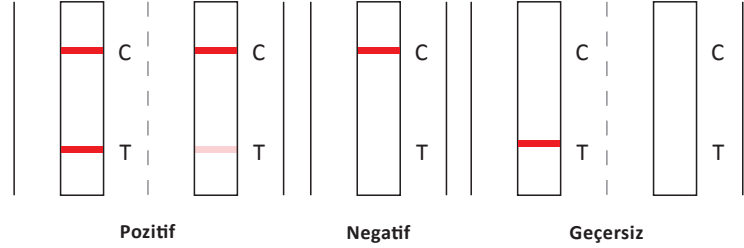

DEPOLAMA

- Test kitleri doğrudan güneş ışığından uzakta, 2-30°C arasında saklanmalıdır. DONDURMAYIN. Soğuk koşullarda saklanması durumunda, kullanmadan önce 15~30 dakika oda sıcaklığında tutun.
- Test kitleri, folyo ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihine kadar (24 ay) stabildir.
- Seri numarası ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiştir.

UYARILAR

- En iyi sonucu elde etmek için, lütfen bu talimatlara kesin olarak uyun.
- Lütfen kullanmadan önce folyo ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihine dikkat edin. Kullanım süresi dolmuş kitleri kullanmayın.
- Kitin havaya uzun süre maruz kalmasını ve nemden etkilenmesini önlemek için test yapılmaya hazır olana kadar kiti folyo ambalajından çıkarmayın. **Folyo ambalaj açıldıktan sonra tüm kullanım işlemi 10 dakika içinde tamamlanmalıdır.**
- Test kiti, damlalık, test buffer solüsyonu ve EDTA tüp dahil olmak üzere kutudaki tüm test malzemeleri tek kullanımlıktır. Yeniden kullanmayın.
- **Teşhis kitlerini, kullanılan tüm pleytlerini, numunelerini, işlem görmüş tüm materyallerini, ekipman ve sarf malzemelerini dekontaminasyon yöntemleri ile dekontamine edildikten sonra tıbbi ürünlerde olduğu gibi "Tıbbi Atık" olarak değerlendirilmesi ve tıbbi atıklar için oluşturulmuş mevzuatlara göre imha edilmesi sağlanmalıdır.**
- Test şeritlerinde anormal oluşumların meydana gelmesini engellemek için, numune bölmelerine numuneyi uygulandıktan sonra test cihazını hareket ettirmeyin.
- Bu kitteki malzemeler standart bir seri birimi olarak kalite kontrole tabi tutulmuştur. Farklı seri numaralı birimlerden malzemeleri karıştırmayın.

SINIRLAMA

Bu test sadece hayvan sağlığında kullanım ve in vitro tanı içindir, çeşitli faktörlerin neden olduğu yanlış negatif ve yanlış pozitif sonuç alma olasılığını tamamen ortadan kaldırmaz. Bu nedenle, test kitlerinden elde edilen sonuçların yanı sıra, veteriner hekimler pratikte kesin tanı koymak için diğer klinik bilgileri ve laboratuvar tanı yöntemlerini de dikkate almalıdır.

ÜRETİCİ FIRMA ADI VE ADRESİ
BIOGUARD Corporation

6F. No.20-1. Wugong 5th Road,Wugu District,
New Taipei City 248020,Taiwan
TEL : +886-2-5591-6688 | FAX : +886-2-6625-8182
https://www.bioguardlabs.com

bioguard
science for animal care

İTHALATÇI FIRMA ADI VE ADRESİ

ORUÇ Özel Veteriner Hizmetleri Hayvancılık Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mansuroğlu Mah. 263/5 Sk. No:3 Bayraklı-İzmir TÜRKİYE