



Sadece veteriner kullanım içindir

Canine Babesia spp. Ab Test

Babesia spp. Antikor Testi



KULLANIM AMACI

Bioguard Canine Babesia spp. Ab Testi, köpek kanında Babesia spp. (Babesia gibsoni, Babesia vogeli, Babesia rossi, Babesia canis) antikorunun hızlı ve nitel tespiti için, Bioguard Corporation tarafından geliştirilmiş ve üretilmiş bir sandviç yanal akış immünokromatografik testtir. Test cihazı, görünmez bir T (test) bölgesi ve C (kontrol) bölgesi ile kaplı olan bir test penceresine sahiptir. Numune, cihazdaki numune bölmesine uygulandığında; reaktif, test şeridinin yüzeyinde yanal olarak akacaktır. Numunede yeterli Babesia Ab varsa, görülebilir bir T bandı belirecektir. Geçerli bir sonuç elde edilebilmesi için, bir numune uygulandıktan sonra C bandı her zaman görünmelidir. Bu sayede cihaz, numunede Babesia Ab varlığını doğru bir şekilde gösterebilir.

KİT BİLEŞENLERİ

BİLEŞENLER	5 TEST/KUTU	10 TEST/KUTU
Babesia Ab test cihazı	5	10
Tek kullanımlık damlalık	5	10
EDTA kan alma tüpü	5	10
Test tamponu şişesi	1	1
Kullanım kılavuzu	1	1


NUMUNE

Köpeğin tam kan, serum veya plazması.


TEST PROSEDÜRÜ

- Kapalı poşeti, test tamponu şişesini ve EDTA kan alma tüpünü kutudan çıkarın.
- Kaseti folyo poşetinden çıkarın ve yatay olarak temiz bir yüzeye yerleştirin.
- Numune olarak, köpeğin tam kan, serum veya plazmasını (EDTA tüpünden santrifüjleme) alın.
- Tek kullanımlık damlalık ile numuneyi alın, bölmeye 1 damla (20 µl) numune damlatın ve hemen 4 damla (100 µl) test tamponu damlatın.
- Sonucu 5-10 dakika içinde yorumlayın. **10 dakikadan sonra sonuç geçersizdir.**

1) Serum Numunesi

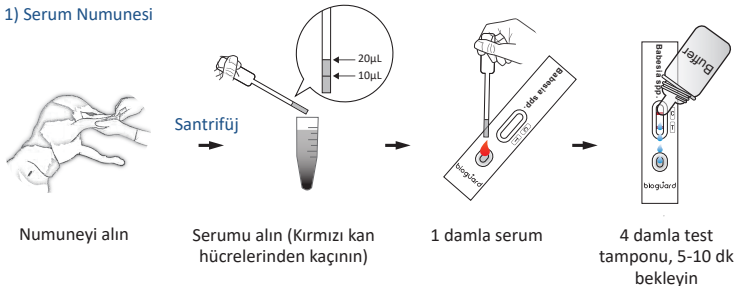


2) Tam kan veya plazma numunesi

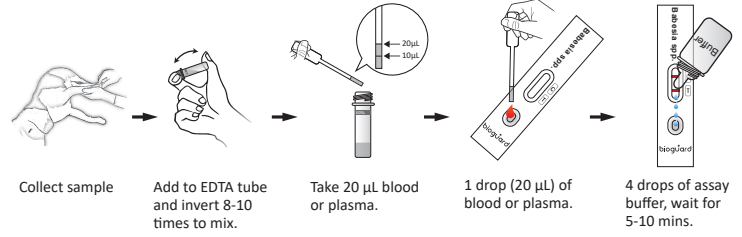

SONUÇLARIN YORUMLANMASI

- Pozitif:** T bandının belirgin veya belli belirsiz olmasına bakılmaksızın, hem C hem de T bandının varlığı
- Negatif:** Sadece belirgin C bandı görünür.
- Geçersiz:** T bandının görünüp görünmemesine bakılmaksızın, C bölgesinde renkli bant görünmez.

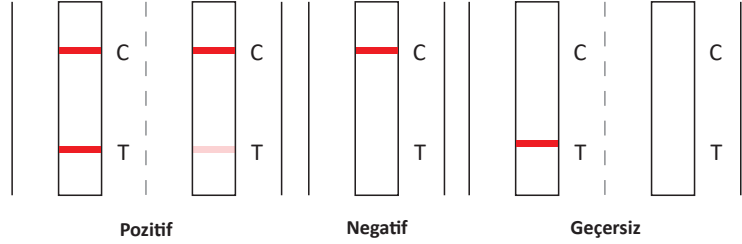

DEPOLAMA

- Test kitleri 2-30°C arasında saklanmalıdır. DONDURMAYIN. Soğuk koşullarda saklanması durumunda, kullanmadan önce 15-30 dakika oda sıcaklığında tutun.
- Doğrudan güneş ışığı altında saklamayın.
- Test kitleri, folyo poşet üzerinde belirtilen son kullanma tarihine kadar (24 ay) stabildir.

UYARILAR

- En iyi sonucu elde etmek için, lütfen bu talimatlara kesin olarak uyun.
- Lütfen kullanmadan önce folyo poşet üzerinde belirtilen son kullanma tarihine dikkat edin. Kullanım süresi dolmuş kitleri kullanmayın.
- Kitin havaya uzun süre maruz kalmasını ve nemden etkilenmesini önlemek için test yapılmaya hazır olana kadar kiti folyo poşetinden çıkarmayın, **ve folyo poşet açıldıktan sonra tüm kullanım işlemi 10 dakika içinde bitmelidir.**
- Test kiti, damlalık, test tamponu ve EDTA tüp dahil olmak üzere kutudaki tüm test malzemeleri tek kullanımlıktır. Yeniden kullanmayın.
- Teşhis kitlerini, kullanılan tüm pleytlerini, numunelerini, işlem görmüş tüm materyallerini, ekipman ve sarf malzemelerini dekontaminasyon yöntemleri ile dekontamine edildikten sonra tıbbi ürünlerde olduğu gibi "Tıbbi Atık" olarak değerlendirilmesi ve tıbbi atıklar için oluşturulmuş mevzuatlara göre imha edilmesi sağlanmalıdır.**
- Test şeritlerinde anormal oluşumlar meydana gelebileceği için, numune bölmelerine numuneler uygulandıktan sonra test şeridini hareket ettirmeyin.
- Bu kitteki malzemelere standart bir seri birimi olarak kalite kontrol testi yapılmıştır. Farklı seri numaralı birimlerden malzemeleri karıştırmayın.

SINIRLAMA

Bu test sadece veteriner kullanım ve in vitro tanı içindir, ve **çeşitli faktörlerin neden olduğu yanlış negatif ve yanlış pozitif sonuç alma olasılığını tamamen ortadan kaldırmaz.** Bu nedenle, test kitlerinden elde edilen sonuçların yanı sıra, veteriner hekimler pratikte kesin tanı koymak için diğer klinik bilgileri ve laboratuvar tanı yöntemlerini de dikkate almalıdır.

